

# Eine genaue und zuverlässige Methode zur Messung der Kolontransitzeit

## WANN

Wenn Patienten mit Symptomen im Zusammenhang mit Verstopfung, Durchfall oder Reizdarmsyndrom präsentieren, wird dieser diagnostische Test verschrieben, um die Transitzeit zu bewerten und wie schnell oder langsam Nahrung/Stuhl durch den Darm reist. Die aus diesem Test generierten Ergebnisse können die Schwere der Transitprobleme quantifizieren und Ärzte bei der Bestimmung des Bedarfs an zusätzlichen diagnostischen Verfahren oder der Auswahl der geeigneten Therapie unterstützen.

## WARUM

Die initiale Behandlung von Verstopfung umfasst oft diätetische und Lifestyle-Änderungen sowie den Versuch von frei verkäuflichen Abführmitteln wie quellenden Mitteln und nicht absorbierbaren Kohlenhydraten. Wenn diese Methoden sich als unwirksam erweisen, kann eine Untersuchung der Kolontransitzeit mit Transit-Pellets-Kapseln angemessen sein.

Indem der Fortschritt der Marker durch den Darm verfolgt wird, kann der Arzt die Schwere der Transitprobleme quantifizieren, und die Ergebnisse können bei der Bestimmung des Bedarfs an zusätzlichen diagnostischen Verfahren und der Auswahl der geeigneten Behandlungsoptionen wichtig sein.



### Zeitplan für die Einnahme der Transit-Pellets-Kapsel

Tag	1	2	3	4	5	6:1	6:2	7
Ringförmige Marker								
Röhrenförmige Marker								
Röntgenaufnahme des Abdomens								

Einzel-Röntgenbild

Der Test beinhaltet die orale Einnahme von sieben Kapseln über einen Zeitraum von sechs Tagen. Jede Kapsel enthält winzige Marker, die mittels Röntgenaufnahmen sichtbar gemacht werden können.

Die Einnahme der Marker ist sicher und die Marker werden mit dem Stuhl ausgeschieden und können sicher durch Spülen der Toilette entsorgt werden.



- FDA 510(k) afstand til brug ved voksne
- FDA 510(k) afstand til brug ved pædiatriske
- CE-mærket


Nur auf Rezept erhältlich. Für Anweisungen und Anwendungsgebiete bitte [www.medifactia.com](http://www.medifactia.com) zu Rate ziehen.

## Medifactia® Transit-Pellets

## WIE


Um den Transit-Pellets-Test durchzuführen, ist eine Überweisung von einem Hausarzt oder Facharzt erforderlich. Die Transit-Pellets-Kapseln können von verschiedenen Orten bezogen werden, wie z.B. der Arztpraxis/Klinik, der Apotheke oder der Radiologie-Klinik. Vor der Anwendung ist es unbedingt erforderlich, die in jeder Transit-Pellets-Box enthaltene Gebrauchsanweisung (IFU) zu lesen.

Als Teil des Transit-Pellets-Diagnoseverfahrens ist am siebten Tag eine Röntgenaufnahme erforderlich. In einigen Fällen wird die Radiologie-Klinik diesen Prozess übernehmen und eine Einladung an den Patienten senden. In anderen Situationen liegt es in der Verantwortung des Patienten, einen Termin für die Untersuchung zu vereinbaren.

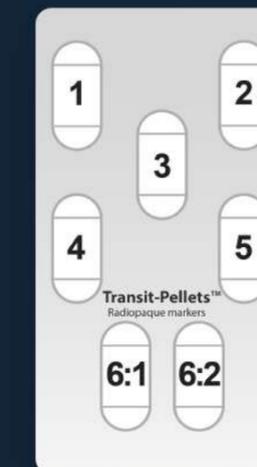

Transit-Pellets™  
Radiopaque markers

6:1 6:2

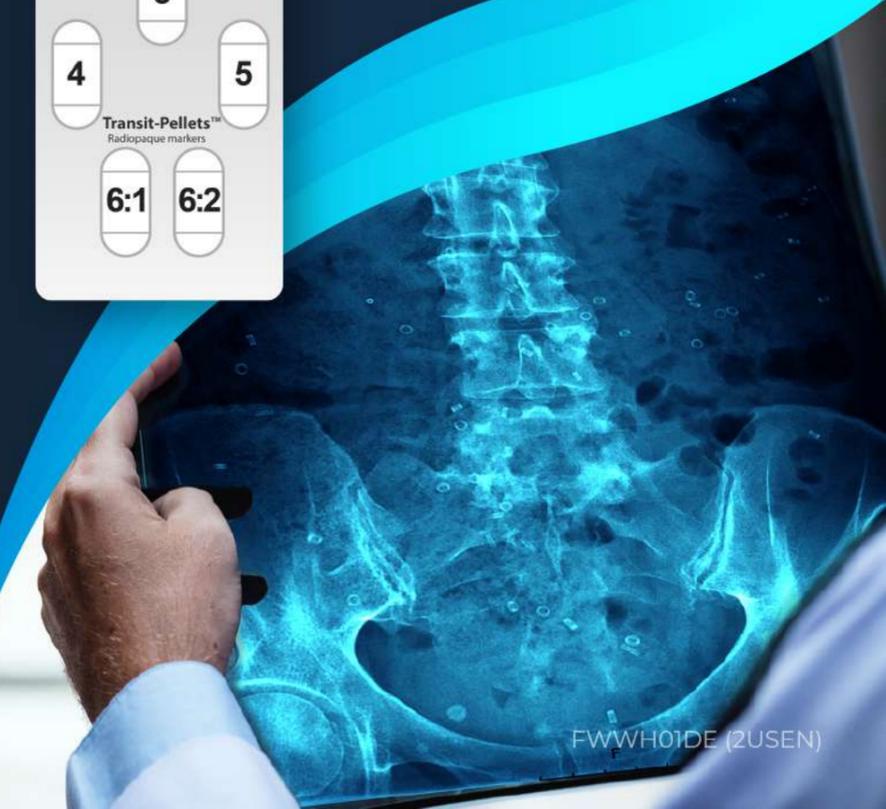

FWWH01DE (ZUSEN)