

# Un método preciso y confiable para medir el tiempo de tránsito colónico.

## CUÁNDO

Cuando los pacientes presentan síntomas relacionados con el estreñimiento, la diarrea o el síndrome del intestino irritable (SII), se prescribe esta prueba diagnóstica para evaluar el tiempo de tránsito colónico y la velocidad a la que los alimentos/heces se mueven a través del intestino. Los resultados generados por esta prueba pueden cuantificar la gravedad del problema y ayudar a los médicos a determinar la necesidad de procedimientos diagnósticos adicionales o a seleccionar la terapia adecuada.

## POR QUÉ

El tratamiento inicial del estreñimiento a menudo incluye cambios en la dieta y el estilo de vida, así como el uso de laxantes de venta libre como agentes formadores de masa y carbohidratos no absorbibles. Si estos métodos resultan ineficaces, puede ser aplicable un estudio de tránsito colónico mediante cápsulas de Transit-Pellets.

Al seguir el progreso de los marcadores a través de los intestinos, el médico puede cuantificar la gravedad de los problemas de tránsito y los resultados pueden ser importantes para determinar la necesidad de procedimientos diagnósticos adicionales y seleccionar las opciones de tratamiento adecuadas.



### Horario de toma de cápsulas de Transit-Pellets

Día	1	2	3	4	5	6:1	6:2	7
Marcadores con forma de anillo								
Marcadores con forma de tubo								
Rayos X abdominales								Rayos X

1 Radiografía

La prueba implica la ingesta oral de siete cápsulas durante un período de seis días, cada una conteniendo pequeños marcadores que pueden ser visualizados mediante imágenes de rayos X.

Consumir los marcadores es seguro y serán eliminados en las heces, y se pueden desechar de manera segura arrojándolos al inodoro.



- Autorización FDA 510(k) para en pediátricos
- Autorización FDA 510(k) para en adultos
- Marcado CE

Solo con receta médica. Para obtener instrucciones e indicaciones de uso, consulte [www.medifactia.com](http://www.medifactia.com)

# Medifactia® Transit-Pellets

## CÓMO

Para someterse a la prueba de Tránsito-Pellets se requiere una referencia de un médico de atención primaria o un especialista. Las cápsulas de Tránsito-Pellets se pueden obtener en diversos lugares, como la consulta del médico/hospital, la farmacia o la clínica de radiología. Antes de su uso, es esencial leer las Instrucciones de uso (IFU) incluidas en cada caja de Tránsito-Pellets.

Como parte del procedimiento diagnóstico de Tránsito-Pellets, se requiere una radiografía en el día siete. En algunos casos, la clínica de radiología se encargará de este proceso y enviará una citación al paciente. Sin embargo, en otras situaciones, la responsabilidad recae en el paciente para programar la cita.

